

Handleiding MultiMotion Duo rollator



Versie 1.0 september 2020



N.B. Deze duo rollator zal geïnstalleerd moeten worden door een competent persoon. Overschrijdt het gebruikersgewicht van 120 KG niet – hierdoor loopt men groot gevaar.

Voor gebruik

- Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het product kan beschadigen.
- Controleer het product voor eventuele zichtbare schade. Als u schade of verdachte fouten ziet verzoeken wij u geen gebruik te maken van het product, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

Beoogd gebruik

Een rollator zorgt voor goede steun tijdens het lopen en is geschikt om producten te vervoeren tijdens bijvoorbeeld het winkelen. De tas is speciaal ontworpen voor deze rollator, combineer geen tassen en/of manden van andere distributeurs, maar gebruik hiervoor alleen de door MultiMotion goedgekeurde producten. Deze rollator is geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik. Wanneer de voetsteunen worden uitgeklappt en de rugband wordt omgedraaid kan de rollator als rolstoel worden gebruikt.






Montage instructies :

Afbeelding 1

(1)

Plaats de voorwielen in het frame en zorg ervoor dat het gat waar de bout doorheen komt op de juiste plek zit. Stop de bout door het gat en plaats daarna de kunststof opvulling en de schroefknop over de bout, draai deze goed vast.

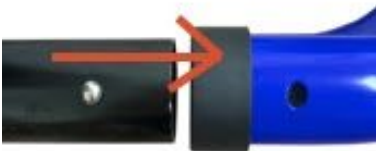

(2)

Afbeelding 2

Monteer de achterwielen door deze in de openingen van het frame te drukken. Er is een duidelijke klik te horen wanneer de achterwielen vastzitten, de sluitingspin zal in het gaatje klikken.



Let er goed op dat de achterwielen aan de buitenzijde van het frame zitten en dat de remkabel aan de onderkant van het frame zit.

Afbeelding 3

(3)

Plaats de handgreep hendels in de juiste opening van het frame. Zorg ervoor dat u de sluitingspin ingedrukt houdt terwijl u hem plaatst. Herhaal dit voor de andere zijde.

Wanneer u de hendels geïnstalleerd heeft zouden de handgrepen naar de achterwielen moeten wijzen. De vinnen van de ergonomische handgrepen moeten naar binnen wijzen.



U kunt de hoogte van de handgrepen eenvoudig aanpassen om een goede loophouding te garanderen. Ga zo rechtop mogelijk achter de rollator staan:

- Houd uw armen straks langs uw lichaam naar beneden.
- De vuistregel is dat de handvatten van de rollator op polshoogte moeten zitten.

Druk op de knop en trek de handgreep naar boven of naar beneden. Laat de knoppen los wanneer hij voor het juiste gaatje zit. Deze knop borgt zit automatisch vast in het frame. Herhaal dit proces totdat de gewenste hoogte is bereikt.



(4)

Afbeelding 4

Bevestig de tas aan de 2 haakjes van het frame die aan de voorkant van de zitting zitten. De boodschappentas kan gemakkelijk weer worden verwijderd indien nodig.

(5)



Afbeelding 5

Plaats de stokhouder in de plastic houder, deze zit aan de zijkant van het frame.

Afbeelding 6, 7 en 8

Plaats de voetsteunen met de gaatjes over de 2 pinnetjes (**afb. 6**). Draai de voetsteun nu in positie, de bevestigingsclip zit dan tegen het frame aan (**afb. 7**)
Druk tegen de bevestigingsclip zodat de voetsteun vast klikt (**afb. 8**).

(6)



(7)



(8)



Aan de onderkant van de voetsteunen zit een bout, wanneer deze los word gedraaid kunnen de voetplaten op de juiste hoogte worden gezet. Als de juiste hoogte is bereikt draait u de bout weer vast.

Wanneer de voetsteunen niet worden gebruikt kunnen deze opzij worden geklappt. Aan de zijkanten zit een kunststof klem waar de voetsteunen dan in vast geklikt kunnen worden.

De rollator in- en uitklappen

Om de rollator in te klappen trekt u de zitting naar boven aan de zwarte hendel, deze zit midden op de zitting. Nu kunt u de rollator eenvoudig inklappen.

(afbeelding 9)

(9)



www.multi-motion.nl

Klap de rollator uit door de handgrepen van elkaar af te trekken. Vergrendel de rollator vervolgens door de zitting aan beide zijde omlaag te drukken tot deze in vergrendeling klikt. **(afb. 10)**

(10)



Bediening van de remmen

1. Knijp voorzichtig de remhendels in om de rollator af te remmen. **(afb. 11)**

(11)



2. De remmen beschikken ook over een parkeeroptie. Druk beide remhendels volledig naar beneden tot ze vast komen te staan. De achterwielen worden op deze manier geblokkeerd en het is dan veilig om op de rollator te zitten. **(afb. 12)**

(12)



3. Om de rollator van de parkeerrem af te halen knijpt u voorzichtig in de remhendels. De rollator is dan weer eenvoudig te gebruiken.


Rem bijstelling

De remmen van uw rollator zullen periodieke bijstelling vereisen.

Om de remmen bij te stellen draait u moer B los en draait u moer A aan om de rem strakker te zetten (of los om minder strak te zetten).

Wanneer dit juist is aangepast (controleer dit door te voelen aan de remmen) draait u moer B weer aan.

Indien verdere bijstelling noodzakelijk is, draai de sluitschroef los (locking screw) en trek vervolgens met een tang de kabel ongeveer een millimeter naar beneden. Draai de sluitschroef weer vast. De remmen kunnen dan verder aangepast worden door het losmaken van moer B en moer A zoals voorheen aangegeven.

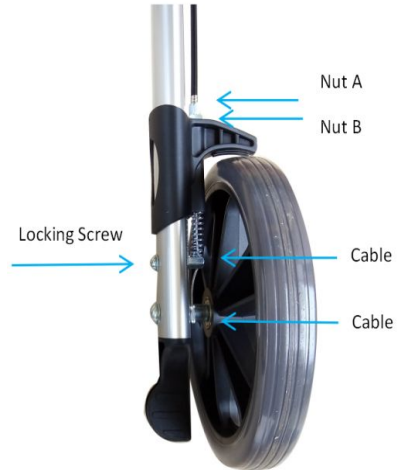

Tweedehands

Als u deze rollator tweedehands heeft gekocht vragen wij u de volgende onderdelen grondig te controleren voor uw eigen veiligheid.

Dit omvat een controle op:

- Gebogen of beschadigde buizen of scheuren in het frame
- Losse of versleten klemmen
- Of het in hoogte verstel systeem goed werkt
- Losse handgrepen
- Losse of versleten wielen en bevestigingsmiddelen
- Gladde, versleten of gespleten rubberen onderdelen

Vervang alle versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen waar nodig. In geval van twijfel, gelieve het product niet te gebruiken, maar onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier voor service.

Zorg en onderhoud voor uw rollator

1. Gebruik uw rollator alleen voor het doel waarvoor het bestemd is, steun bij het lopen. Het is de bedoeling dat uw rollator alleen wordt gebruikt op trottoirs, straat of in huis. Gebruik deze rollator niet op ruw terrein of grind. Gebruik van uw rollator op deze oppervlakken kan leiden tot ernstig gevaar voor uw veiligheid en kan schade aanbrengen aan de rollator.

2. Houd uw rollator schoon door deze af te vegen met een vochtige doek met een milde zeep. Veeg alle oppervlakken af met een droge doek

3. Gebruik met regelmaat WD40 op alle metalen bewegende delen waaronder het scharnier en de remmen.
4. Controleer regelmatig of alle wielen en het vouwmechanisme correct functioneren en dat alle wielen vrij kunnen bewegen.
5. Controleer of alle vergrendel pennen goed geborgd zijn. Controleer of er geen onderdelen los zitten.
6. Monteer geen onderdelen of accessoires aan uw rollator vervaardigd door een ander bedrijf. Wanneer u dit doet zal de garantie nietig worden verklaard en kunt u uw eigen veiligheid in gevaar brengen.

Service en Garantie

MultiMotion stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rollator de aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. De rollator is, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat, wanneer de gebruiksaanwijzingen niet correct wordt nageleefd, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Op deze rollator zit een garantietermijn van 24 maanden. Neem voor garantie en service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht. Hebt u na deze termijn van 24 maanden toch (technische) problemen met het product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele oplossing.

Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling klantenservice op onderstaand adres:
info@multi-motion.nl

Distributeur:
MultiMotion
Weezenhof 61-58
6536 AM Nijmegen
Nederland
Tel. 024-6794583

EU representative:
Sungo Europe B.V.
Olympisch stadion 24
1076 DE Amsterdam
Nederland

Fabrikant:
Foshan Oscar Medical Instrument CO.,LTD
Add:No. 2 (Workshop C), Nanhai National Eco-industrial Demonstration Park
Danzao Town, Nanhai District
Foshan city, Guangdong Province
China

MultiMotion is in het bezit van een "Declaration of Conformity" en een "Explosive view" met onderdelenlijst.

www.multi-motion.nl