

Handleiding MultiMotion Light XL



Versie 1.0 september 2020



N.B. Deze rollator zal geïnstalleerd moeten worden door een competent persoon. Overschrijdt het gebruikersgewicht van 200 KG niet – hierdoor loopt men groot gevaar.

Voor gebruik

- Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het product kan beschadigen.
- Controleer het product voor eventuele zichtbare schade. Als u schade of verdachte fouten ziet verzoeken wij u geen gebruik te maken van het product, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

Beoogd gebruik

Een rollator zorgt voor goede steun tijdens het lopen en is geschikt om producten te vervoeren tijdens bijvoorbeeld het winkelen. De tas is speciaal ontworpen voor deze rollator, combineer geen tassen en/of manden van andere distributeurs, maar gebruik hiervoor alleen de door MultiMotion goedgekeurde producten. Deze rollator is geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik.



1. handvatten
2. in hoogte verstelbaar handvat
3. reflector op handvat
4. remhendel met parkeerfunctie
5. knop voor hoogteverstelling
6. rugband
7. zitting
8. tas
9. voorwiel
10. stelschroef voor remmen
11. achterwiel

Montage instructies :

Afbeelding 1

Klap de rollator uit door de handgrepen van elkaar af te trekken. Vergrendel de rollator vervolgens door de zitting aan beide zijde omlaag te drukken tot deze in vergrendeling klikt.

(1)



Afbeelding 2

Plaats de handgreep hendels in de juiste opening van het frame. Zorg ervoor dat u de sluitingspin ingedrukt houdt terwijl u hem plaatst. Herhaal dit voor de andere zijde.

(2)



Wanneer u de hendels geïnstalleerd hebt zouden de handgrepen naar de achterwielen moeten wijzen. De vinnen van de ergonomische handgrepen moeten naar binnen wijzen.

Afbeelding 3

U kunt de hoogte van de handgrepen eenvoudig aanpassen om een goede loophouding te garanderen. Ga zo rechtop mogelijk achter de rollator staan:

- Houd uw armen straks langs uw lichaam naar beneden
- De vuistregel is dat de handvatten van de rollator op polshoogte moeten zitten.

(3)



Druk op de knop en trek de handgreep naar boven of naar beneden. Laat de knoppen los wanneer hij voor het juiste gaatje zit. Deze knop borgt zit automatisch vast in het frame. Herhaal dit proces totdat de gewenste hoogte is bereikt.

Afbeelding 4

Bevestig de tas aan de 2 haakjes van het frame die aan de voorkant van de zitting zitten. De boodschappentas kan gemakkelijk weer worden verwijderd indien nodig.

(4)



De rollator inklappen

Afbeelding 5

Om de rollator in te klappen trekt u de zitting naar boven aan de zwarte hendel, deze zit midden op de zitting. Nu kunt u de rollator eenvoudig inklappen.

(5)



Bediening van de remmen

1. Knijp voorzichtig de remhendels in om de rollator af te remmen. **(afb. 6)**

2. De remmen beschikken ook over een parkeeroptie. Druk beide remhendels volledig naar beneden tot ze vast komen te staan. De achterwielen worden op deze manier geblokkeerd en het is dan veilig om op de rollator te zitten. **(afb. 7)**

3. Om de rollator van de parkeerrem af te halen knijpt u voorzichtig in de remhendels. De rollator is dan weer eenvoudig te gebruiken.

(6)



(7)



Rem bijstelling

Om de remmen bij te stellen heeft u een 8 mm en een 10 mm moersleutel nodig. De stelschroef om de remmen bij te stellen zit onderaan de remkabel (boven de achterwielen).

Om de remmen strakker te zetten draait u de bovenste stelschroef naar boven. Als de remmen op de gewenste stand staan draait u de onderste stelschroef naar beneden zodat hij vast blijft in zijn positie.

Opmerking: er moet altijd een kleine opening tussen de rem en het wiel zitten als de remhendel wordt losgelaten.



Tweedehands

Als u deze rollator tweedehands heeft gekocht vragen wij u de volgende onderdelen grondig te controleren voor uw eigen veiligheid.

Dit omvat een controle op:

- Gebogen of beschadigde buizen of scheuren in het frame
- Losse of versleten klemmen
- Of het in hoogte verstel systeem goed borgt
- Losse handgrepen
- Losse of versleten wielen en bevestigingsmiddelen
- Gladde, versleten of gespleten rubberen onderdelen

Vervang alle versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen waar nodig. In geval van twijfel, gelieve het product niet te gebruiken, maar onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier voor service.

Zorg en onderhoud voor uw rollator

1. Gebruik uw rollator alleen voor het doel waarvoor het bestemd is, steun bij het lopen. Het is de bedoeling dat uw rollator alleen wordt gebruikt op trottoirs, straat of in huis. Gebruik deze rollator niet op ruw terrein of grind. Gebruik van uw rollator op deze oppervlakken kan leiden tot ernstig gevaar voor uw veiligheid en kan schade aanbrengen aan de rollator.
2. Houd uw rollator schoon door deze af te vegen met een vochtige doek met een milde zeep. Veeg alle oppervlakken af met een droge doek
3. Gebruik met regelmaat WD40 op alle metalen bewegende delen waaronder het scharnier en de remmen.
4. Controleer regelmatig of alle wielen en het vouwmechanisme correct functioneren en dat alle wielen vrij kunnen bewegen.
5. Controleer of alle vergrendel pennen goed geborgd zijn. Controleer of er geen onderdelen los zitten.
6. Monteer geen onderdelen of accessoires aan uw rollator vervaardigd door een ander bedrijf. Wanneer u dit doet zal de garantie nietig worden verklaard en kunt u uw eigen veiligheid in gevaar brengen.

Service en Garantie

MultiMotion stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rollator de aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. De rollator is, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat, wanneer de gebruiksaanwijzingen niet correct worden nageleefd, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Op deze rollator zit een garantietermijn van 24 maanden. Neem voor garantie en service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht. Hebt u na deze termijn van 24 maanden toch (technische) problemen met het product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele oplossing.

Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling klantenservice op onderstaand adres:
info@multi-motion.nl

Distributeur:

MultiMotion
Weezenhof 61-58
6536 AM Nijmegen
Nederland
Tel. 024-6794583

EU representative:

Sungo Europe B.V.
Olympisch stadion 24
1076 DE Amsterdam
Nederland

Fabrikant:

Foshan Oscar Medical Instrument CO.,LTD
Add:No. 2 (Workshop C), Nanhai National Eco-industrial Demonstration Park
Danzao Town, Nanhai District
Foshan city, Guangdong Province
China

MultiMotion is in het bezit van een "Declaration of Conformity" en een "Explosive view" met onderdelenlijst.

www.multi-motion.nl