

---

# Handleiding MultiMotion Trollimaster RG70



**Versie 1.0**  
**Mei 2020**



**N.B. Deze rollator zal geïnstalleerd moeten worden door een competent persoon. Overschrijdt het gebruikersgewicht niet – hierdoor loopt men groot gevaar.**

## Voor gebruik

- Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het product kan beschadigen.
- Controleer het product voor eventuele zichtbare schade. Als u schade of verdachte fouten ziet verzoeken wij u geen gebruik te maken van het product, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

## Beoogd gebruik

Een rollator zorgt voor goede steun tijdens het lopen en is geschikt om producten te vervoeren tijdens bijvoorbeeld het winkelen. De tas is speciaal ontworpen voor deze rollator, combineer geen tassen en/of manden van andere distributeurs, maar gebruik hiervoor alleen de door MultiMotion goedgekeurde producten. Deze rollator is geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik.

## Onderdelenlijst



1. Rugband
2. Handvatten
3. Remhendels
4. Verstelschroef remmen
5. In hoogte verstelbare frame
6. Vergrendelknop hoogteverstelling
7. Aluminium frame
8. Achterwielen
9. Verstelschroef remmen
10. Voorwielen
11. Tas
12. Zitting



Als u het idee heeft dat u een afwijking aan het product ziet neemt u dan aub contact op met uw leverancier.


## 1. De handvatten met de remmen monteren




De rollator dient uitgeklaapt te zijn wanneer u begint. De rode clip dient geopend te zijn. Schuif nu de buis met het handvat in het frame. U kunt de buis enkel vergrendelen als de pin in de daarvoor bestemde uitsparing valt. De openingen in de buis moeten naar het midden wijzen.

Stel de gewenste hoogte in en sluit de rode clip op het frame. De clip zal een duidelijke 'klik' geven wanneer deze goed vastzit.

## 2. De rugband monteren

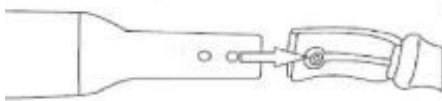


Schuif de rugband in de opening op de buis van het handvat. De zacht gevulde kant van de rugband dient naar de binnenkant te wijzen.

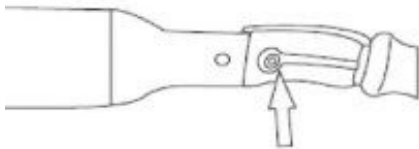


Zet de rugband vast door de schroef met de moer vast te draaien.


## 3. Het boodschappenmandje monteren

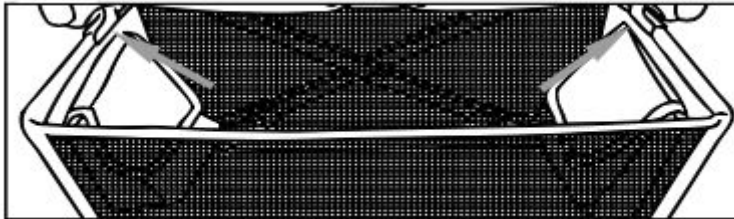

Schuif de haken van het mandje in de beugels onder de zitting.

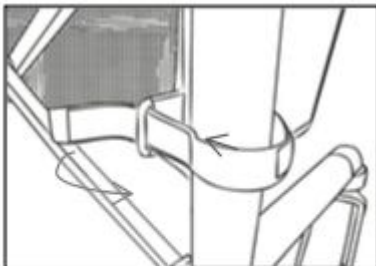


Doe de lus (klittenband) rondom het frame en haal deze door de opening van de sleuf.

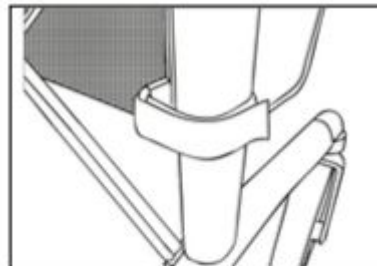


Zet hem zo strak mogelijk vast met het klittenband.

**PAS OP:** Belast het mandje niet teveel. Maximale belasting 5 kg.


## Gebruik van de remmen

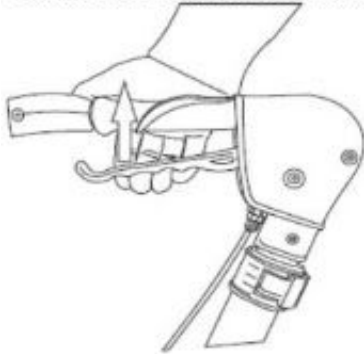

Druk de rem in om af te remmen of om de vergrendeling eraf te halen.

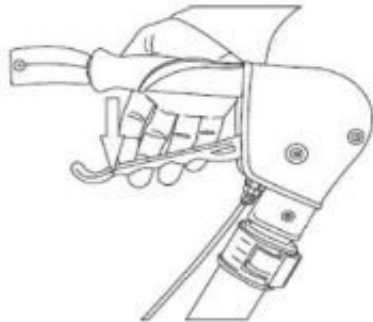

Druk de rem naar beneden om de rem te vergrendelen.

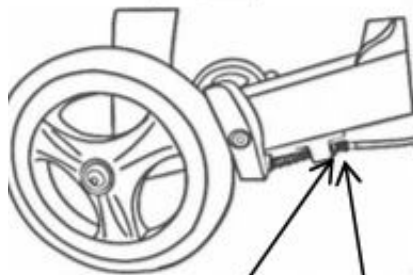


Stel de remspanning in door de schroef vaster of losser te draaien.

Slotbout

Verstelbare schroef

## In-en uitklappen van de rollator

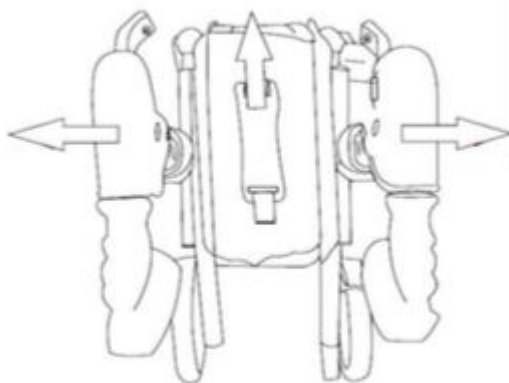

Om de rollator in te klappen trekt u het rode handvat op de zitting omhoog.

Om de rollator uit te klappen trekt u de handvatten uiteen en drukt u op de zitting zodat de rollator volledig uitklapt.

---

## Op de rollator gaan zitten



Voordat u op de rollator gaat zitten dient u de rollator altijd eerst op de parkeerrem te zetten. Dit doet u door de remhendels omlaag te duwen.

Ga niet met uw volledige gewicht op de rollator hangen wanneer u gaat zitten. Gebruik de handvatten om stabiel te blijven staan wanneer u voorzichtig omdraait. Houd de handvatten vast, laat u langzaam zakken en neem plaats op de rollator.

## Tweedehands

Als u deze rollator tweedehands heeft gekocht vragen wij u de volgende onderdelen grondig te controleren voor uw eigen veiligheid.

Dit omvat een controle op:

- Gebogen of beschadigde buizen of scheuren in het frame
- Losse of versleten klemmen
- Of het in hoogte verstel systeem goed borgt
- Losse handgrepen
- Losse of versleten wielen en bevestigingsmiddelen
- Gladde, versleten of gespleten rubberen onderdelen

**Vervang alle versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen waar nodig. In geval van twijfel, gelieve het product niet te gebruiken, maar onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier voor service.**

---

## Zorg en onderhoud voor uw rollator

1. Gebruik uw rollator alleen voor het doel waarvoor het bestemd is, steun bij het lopen. Het is de bedoeling dat uw rollator alleen wordt gebruikt op trottoirs, straat of in huis. Gebruik deze rollator niet op ruw terrein of grind. Gebruik van uw rollator op deze oppervlakken kan leiden tot ernstig gevaar voor uw veiligheid en kan schade aanbrengen aan de rollator.
2. Houd uw rollator schoon door deze af te vegen met een vochtige doek met een milde zeep. Veeg alle oppervlakken af met een droge doek
3. Gebruik met regelmaat WD40 op alle metalen bewegende delen waaronder het scharnier en de remmen.
4. Controleer regelmatig of alle wielen en het vouwmechanisme correct functioneren en dat alle wielen vrij kunnen bewegen.
5. Controleer of alle vergrendel pennen goed geborgd zijn. Controleer of er geen onderdelen los zitten.
6. Monteer geen onderdelen of accessoires aan uw rollator vervaardigd door een ander bedrijf. Wanneer u dit doet zal de garantie nietig worden verklaard en kunt u uw eigen veiligheid in gevaar brengen.



## Service en Garantie

MultiMotion stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rollator de aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. De rollator is, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat, wanneer de gebruiksaanwijzingen niet correct worden nageleefd, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Op deze rollator zit een garantietermijn van 24 maanden. Neem voor garantie en service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht. Hebt u na deze termijn van 24 maanden toch (technische) problemen met het product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele oplossing.

Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling klantenservice op onderstaand adres:  
info@multi-motion.nl

**Distributeur:**

MultiMotion  
Weezenhof 61-58  
6536 AM Nijmegen  
Nederland  
Tel. 024-6794583

**EU representative:**

Obelis s.a. - O.E.A.R.C.  
Bld Général Wahis 53  
1030 Brussel  
België

**Fabrikant:**

Trolli Master Sdn Bhd  
Lot 525, Mukim Telok Panglima  
Garang, Kuala Langat, 42500  
Selangor, Malaysia

*MultiMotion beschikt over een Declaration of conformity*

---

# Handbuch MultiMotion Trollimaster RG70



**Version 1.1  
Januar 2019**



**Hinweis: Dieser Rollator muss von einer kompetenten Person installiert werden.  
Überschreiten Sie nicht das Benutzergewicht - dies kann sehr gefährlich sein.**



## Vor Verwendung

- Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungen. Vermeiden Sie die Verwendung von Messern oder anderen scharfen Instrumenten, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden. Wenn Sie Schäden oder verdächtige Fehler feststellen, verwenden Sie das Produkt bitte nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um Hilfe zu erhalten.

## Beabsichtigte Verwendung

Ein Rollator bietet eine gute Unterstützung beim Gehen und eignet sich z.B. für den Transport von Produkten beim Einkaufen. Die Tasche ist speziell für diesen Rollator konzipiert, kombinieren Sie keine Taschen und/oder Körbe von anderen Händlern, sondern verwenden Sie nur die von MultiMotion zugelassenen Produkte. Dieser Rollator ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

## Stückliste



1. Rückengurt
2. Griffe
3. Bremshebel
4. Regulierschraube Bremsen
5. Höhenverstellbarer Rahmen
6. Knopf für die Höhenverstellung
7. Rahmen
8. Hinterräder
9. Regulierschraube Bremsen
10. Vorderräder
11. Tasche
12. Sitz



Wenn Sie die Vorstellung haben, dass Sie eine Produktabweichung sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

## 1. Montage der Griffe mit den Bremsen




Der Rollator sollte ausgeklappt sein, wenn Sie beginnen. Der rote Clip sollte geöffnet sein. Schieben Sie nun das Rohr mit dem Griff in den Rahmen. Sie können das Rohr nur verriegeln, wenn der Stift in die vorgesehene Aussparung fällt. Die Öffnungen in der Röhre sollten zur Mitte hin zeigen.

Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und schließen Sie den roten Clip auf dem Rahmen. Der Clip macht einen deutlichen 'Klick', wenn er fest angebracht ist.

## 2. Montage des Rückengurtes




Schieben Sie den hinteren Riemen in die Öffnung am Rohr des Griffs. Die weich gepolsterte Seite des Rückengurtes sollte nach innen zeigen.

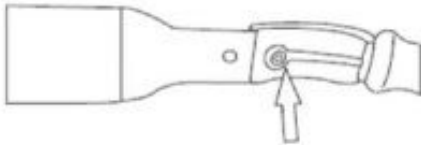


Sichern Sie den Rückengurt, indem Sie die Schraube mit der Mutter anziehen.


## 3. Zusammenstellen des Einkaufskorbs

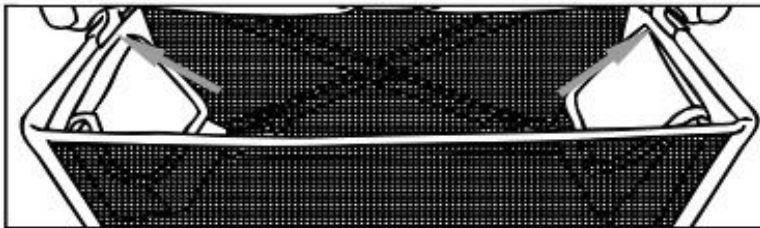

Schieben Sie die Haken des Korbes in die Halterungen unter dem Sitz.

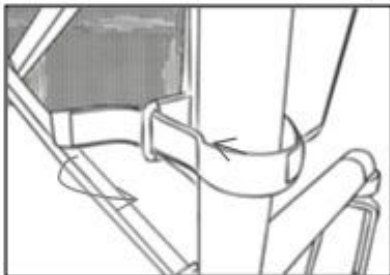


Legen Sie die Schlaufe (Klettverschluss) um den Rahmen und ziehen Sie sie durch die Öffnung des Schlitzes.

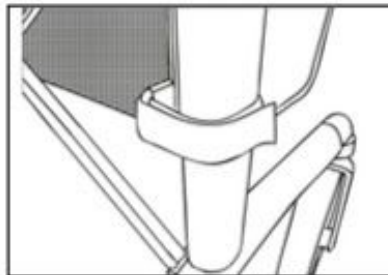


Befestigen Sie ihn so fest wie möglich mit dem Klettverschluss.

**VORSICHT:** Überladen Sie den Korb nicht. Maximale Belastung 5 kg.


## Verwendung der Bremsen

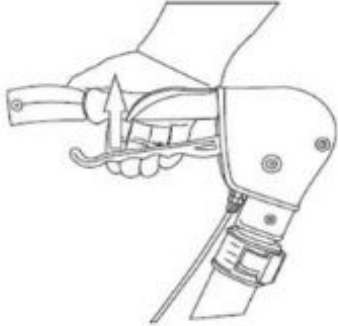

Drücken Sie die Bremse, um zu verlangsamen oder die Sperre zu lösen.

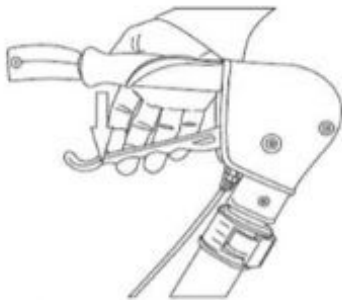

Drücken Sie die Bremse nach unten, um zu verriegeln.

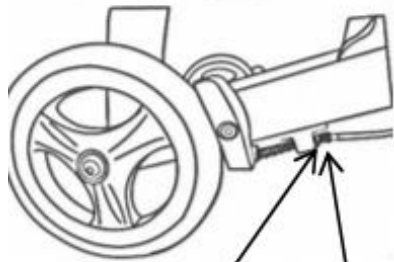


Stellen Sie die Bremsspannung durch Anziehen oder Lösen der Schraube ein.

Riegel

Einstellbare Schraube

## Ein- und Ausklappen des Rollators

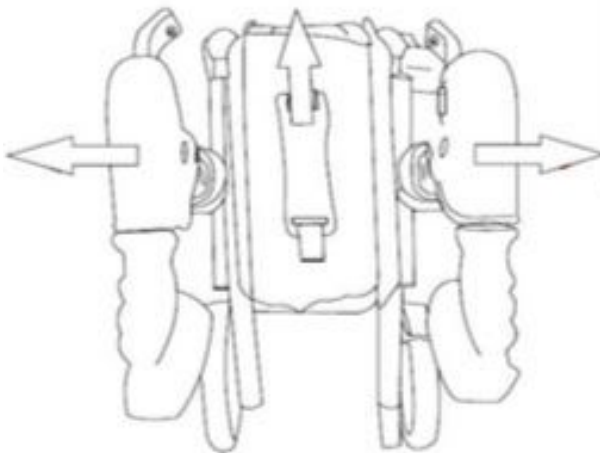

Um den Rollator zu falten, ziehen Sie den roten Griff am Sitz nach oben.



Um den Rollator zu entfalten, ziehen Sie die Griffe auseinander und drücken Sie auf den Sitz, so dass sich der Rollator vollständig entfaltet.

---

## Auf dem Rollator sitzen



Bevor Sie sich auf den Rollator setzen, stellen Sie den Rollator immer zuerst auf die Feststellbremse. Dies geschieht durch Herunterdrücken der Bremshebel.

Legen Sie nicht Ihr volles Gewicht auf den Rollator, wenn Sie sich hinsetzen. Benutzen Sie die Griffe, um stabil zu bleiben, wenn Sie sich vorsichtig umdrehen. Halten Sie die Griffe fest, senken Sie sich langsam ab und nehmen Sie Ihren Platz auf dem Rollator ein.

## Gebraucht

Wenn Sie diesen Rollator aus zweiter Hand gekauft haben, bitten wir Sie, zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Teile gründlich zu prüfen.

Dies beinhaltet eine Überprüfung:

- Verbogene oder beschädigte Rohre oder Risse im Rahmen
- Lose oder abgenutzte Schellen
- Ob das Höhenverstellungssystem gut sichert
- Lose Griffe
- Lose oder abgenutzte Räder und Befestigungselemente
- Glatte, verschlissene oder geteilte Gummiteile

**Ersetzen Sie alle verschlissenen, fehlenden oder beschädigten Teile, wenn nötig. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Produkt bitte nicht, sondern wenden Sie sich sofort an Ihren Lieferanten.**

---

## Pflege und Wartung für Ihren Rollator

1. Genutzen Sie Ihren Rollator nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, nämlich zur Unterstützung beim Gehen. Es ist vorgesehen, dass Ihr Rollator nur auf den Bürgersteigen, auf der Straße oder im Haus benutzt wird. Verwenden Sie diesen Rollator nicht auf unebenem Gelände oder Kies. Die Verwendung Ihres Rollators auf diesen Oberflächen kann zu einer ernsthaften Gefahr für Ihre Sicherheit führen und den Rollator beschädigen.
2. Halten Sie Ihren Rollator sauber, indem Sie ihn mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem trockenen Tuch ab.
3. Verwenden Sie WD40 regelmäßig an allen beweglichen Metallteilen, einschließlich des Scharniers und der Bremsen.
4. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Räder und der Faltmechanismus korrekt funktionieren und sich alle Räder frei bewegen können.
5. Prüfen Sie, ob alle Verriegelungsstifte ordnungsgemäß gesichert sind. Prüfen Sie, dass keine Teile lose sind.
6. Montieren Sie keine Teile oder Zubehörteile an Ihrem Rollator, die von einer anderen Firma hergestellt wurden. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann Ihre eigene Sicherheit gefährden.



## Service und Garantie

MultiMotion übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen des Benutzers oder Sachschäden, wenn die Empfehlungen und Warnungen bei der Verwendung des Rollators nicht befolgt werden. Der Rollator ist ein äußerst sicheres und stabiles Produkt, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen Verhaltensregeln eingehalten werden. Es ist jedoch möglich, dass bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung gefährliche Situationen entstehen können.

Dieser Rollator hat eine Garantiezeit von 24 Monaten. Für Garantie und Service wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben. Sollten Sie nach diesem Zeitraum von 24 Monaten immer noch (technische) Probleme mit dem Produkt haben, können Sie sich auch an den autorisierten Händler wenden, um eine mögliche Lösung zu finden.

Sollte es vorkommen, dass Ihnen in Bezug auf Garantie und Service nicht zufriedenstellend geholfen wird, senden Sie bitte eine E-Mail an den MultiMotion Kundendienst unter der unten angegebenen Adresse:  
info@multi-motion.nl

**Verteiler:**

MultiMotion  
Weezenhof 61-58  
6536 AM Nijmegen  
Die Niederlande  
Tel. +3124-6794583

**EU-Vertreter:**

Obelis s.a. - O.E.A.R.C.  
Bld Général Wahis 53  
1030 Brussel  
Belgien

**Hersteller:**

Trolli Master Sdn Bhd  
Lot 525, Mukim Telok Panglima  
Garang, Kuala Langat, 42500  
Selangor, Malaysia

*MultiMotion verfügt über eine Konformitätserklärung*